

Úvod



Použitie

- **Batériové napájanie**
Ako pripojiť batériu




1. Odstráňte kryt (obr. 1)
2. Pripevnite batériu (obr. 2)

Ako nabíjať batériu



1. Vložte batériu do nabíjačky
2. Zasuňte konektor do adaptéru a pripojte adaptér do elektrickej siete (obr. 4)

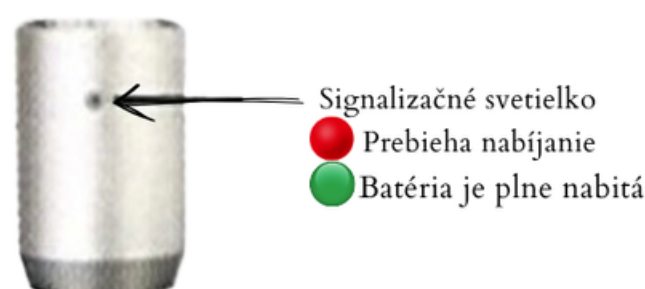


Súčiastky



Hlavice

Určené na použitie s prístrojom

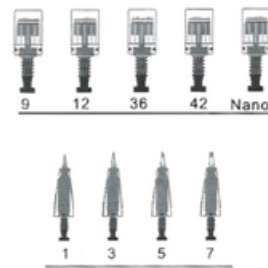

Použitie

- **Napájanie zo siete**
 1. Nasadíte kryt (obr.5)
 2. Zasuňte konektor do adaptéru (obr.6)
 3. Zapojte adaptér do elektrickej siete



Ako nasadiť hlavicu

1. Vyber si hlavicu zo sterilného obalu
2. Vložte konektor hlavice 2 do otvoru a zatlačte ju vodorovne až na doraz
3. Zaistite hlavicu otočením proti smeru hodinových ručičiek
4. Dĺžka ihly sa nastavuje až po zapnutí prístroja
5. Na vybratie hlavice ju otočte v smere hodinových ručičiek a vodorovne vytiahnite



Dermapen h6

Použitie

Nastavenie dĺžky ihly



Dĺžku ihly môžete nastaviť otočením nastavovacieho krúžku. Otočením v smere hodinových ručičiek dĺžku zvýšite. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek ju znížite.

Použitie

Zapnutie a nastavenie rýchlosti



Tlačítko zapnutia
stlačte a podržte 2 sekundy

Po zapnutí sa prístroj spustí na najnižšej rýchlosti. Prístroj má 5 rýchlostných stupňov.

Každé stlačenie tlačidla zvýši rýchlosť o jeden stupeň, pričom zelená kontrolka bliká rýchlejšie. Pri piatom stlačení sa prístroj prepne späť na najnižšiu rýchlosť. Na vypnutie stlačte tlačidlo a podržte ho 2 sekundy.

Obsah balenia

- | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|
| Prístroj | 1 | Nabíjačka | 1 |
| Batéria | 2 | Hlavica | 2 12-ihličkové |
| Adaptér | 1 | Príručka | 1 |

špecifikácia

Účel použitia

Prístroj na mikroihličkovú terapiu

Účinok

Prístroj prepichuje pokožku ihličkami, ktoré sa pohybujú vo zvislej polohe, čím zabezpečuje prenikanie účinných látok do pokožky a jej stimuláciu.

Špecifikácie

Názov: Auto-stamp

Motorizedmeso Machine

Model: W&O Microneedle Pen

Adaptér: 5V, 1000mA

Hmotnosť prístroja: 62 g

Rozmery: 126 × 23 mm

Výrobca: Gauangzhou Dermadream Eletronic Technology Co.,Ltd
3. poschodie, budova A, č. 81, Zijing Road,
Liwan District, Guangzhou, Guangdong, Čína
Zástupca v EÚ: W&O Medical Esthetics GmbH, Rathousplatz
9,61440 Oberursel, Nemecko
Distribútor pre ČR a SR: International Medical Expert s.r.o.
Slovakia

Údržba

Všeobecná údržba

- Po použití utrite povrch suchou handričkou.
- Skladujte prístroj s odpojeným napájaním.
- Chráňte prístroj pred priamym slnečným žiarením, vysokou teplotou a vlhkosťou.

Bežná prehliadka

- Pred použitím skontrolujte zariadenie a adaptér.
- Ak prístroj nebol dlhšie používaný, pred použitím skontrolujte, či funguje správne a bezpečne.

Pred použitím si prečítajte pokyny a postupujte podľa návodu.

Nepoužívajte prístroj u osôb, ktoré:

1. majú akútne ochorenie alebo krvácanie,
2. trpia alergiou alebo hemofíliou,
3. majú melanózu na tvári,
4. majú teplotu nad 38 °C,
5. sú pravidelne hospitalizované v nemocnici,
6. užívajú lieky,
7. sú mladšie ako 12 rokov.

Nepoužívajte prístroj s iným napájaním ako striedavý prúd 220 V. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo poruche prístroja.

Označenie

	sřídavý proud		sřírové číslo
	stálý proud		zástupce v EU
	zařizení II.třidy		CE označení
	prečtete si návod		výrobce
	datum výroby		přiložná část typu F

Záruka

V prípade poruchy akéhokoľvek z našich produktov počas záručnej doby 2 roky od dátumu zakúpenia zabezpečíme bezplatnú opravu alebo výmenu. Záruka však neplatí v týchto prípadoch: poškodenie spôsobené neopatrným zaobchádzaním používateľa, samostatnou opravou alebo úpravou zariadenia; poškodenie spôsobené opravou zariadenia neoprávnenou osobou alebo servisným strediskom, ktoré nebolo určené výrobcom; mechanické poškodenie, napríklad po páde; poškodenie spôsobené použitím neoriginálneho príslušenstva alebo súčiastok; alebo poškodenie spôsobené prírodnými živlami, ako sú požiar, voda či soľ.

Nepoužívajte prístroj:

- S poškodeným napájacím káblom – mohlo by dôjsť k požiaru (poškodený kábel vymeňte),
- V prostredí s vysokou teplotou, prachom alebo vlhkosťou (napr. v blízkosti zvlhčovača vzduchu), pretože by mohlo dôjsť k poruche prístroja,
- S pripojovacím káblom, ktorý má praskliny alebo trhliny, pretože by mohlo dôjsť k poškriabaniu pokožky.

Dalšie upozornenia

- Ak prístroj nepoužívate dlhší čas, odpojte ho zo zásuvky.
- Neopravujte, nerozoberajte a neupravujte prístroj samostatne, mohlo by dôjsť k jeho poruche.
- Nedovoľte používanie prístroja neoprávnenej osobe – mohlo by dôjsť k úrazu alebo poškodeniu prístroja.
- Nedotýkajte sa prístroja ani neodpájajte napájacie káble mokrymi rukami – mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Pred použitím vždy skontrolujte prístroj. Ak zistíte poruchy, prístroj nepoužívajte a nechajte ho opraviť.