



NÁVOD NA POUŽITÍ





OBSAH

01	POPIS / PODMÍNKY POUŽITÍ	04
02	KONTRAINDIKACE	05
03	BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA / UPOZORNĚNÍ	06
04	SADA / OBSAH BALENÍ	07
05	BATERIE / AKUMULÁTOR / NABÍJENÍ / PROVOZ OD SÍTĚ	08 - 09
06	ZAHÁJENÍ PROVOZU	10 – 11
07	STERILNÍ JEHLY / NASAZOVÁNÍ JEHLY NA PŘÍSTROJ	12
08	ÚDRŽBA A TECHNICKÝ SERVIS // ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	13
09	FUNKČNÍ PORUCHA // ODSTRANĚNÉ PORUCH	14
10	TECHNICKÉ PARAMETRY	15
11	PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ, PROVOZU A PŘEPRAVY	16
12	RECYKLACE PŘÍSTROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A OBALŮ	17
13	ZÁRUKA	18 – 19

Výrobce

Luxus BeautyLine | Oxana Dillmann

Bahnhofstr. 17a
53604 Bad Honnef
Deutschland

Tel: 02224 - 9675348

Fax: 02224 - 9697319

Mail: info@luxusplasmaliner.de
www.luxusplasmaliner.de

Značky

Označení



Sériové číslo



Produkt vyhovuje
směrnici EC 2012/19/EU
WEEE-Reg.-Nr. DE 88250753



Stupeň krytí III



Stálý proud



Luxus PlasmaLiner je vysoce kvalitní produkt německé výroby, určený výhradně ke kosmetickým účelům. Luxus PlasmaLiner prošel víceúrovňovou certifikací.

Luxus PlasmaLiner vyhovuje aplikovatelným požadavkům směrnice EC č. 765/2008 a má označení CE.

Luxus PlasmaLiner byl testován v TÜV Saarland na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pod č.: 85018_19072018_LPL.

S přístrojem Luxus PlasmaLiner smějí pracovat pouze lékaři, kosmetičky a odborníci na trvalý make-up při použití výhradně ke kosmetologickým účelům a to po absolvování povinného jednodenního školení. Ošetření různých partií se provádí dle přesně určených zón a vyžaduje speciální proškolení (viz text přednášek kurzu pro začátečníky «Basic» a kurzu pro pokročilé «Advanced»).

Ošetření přístrojem Luxus PlasmaLiner probíhá bez přímého kontaktu s pokožkou. Ve vzdálenosti cca 1-2 mm od pokožky způsobuje přístroj elektrický výboj, který vyvolává vypařování vody z kůže v ošetřované oblasti a tím přispívá k požadovanému napnutí kůže.

Přístroj Luxus PlasmaLiner je určen výhradně ke komerčnímu využití a prodává se pouze výše uvedeným odborníkům.

- » Náchylnost k tvorbě keloidních jizev (pro ohodnocení požádejte pacientku, aby Vám ukázala starou jizvu)
- » Přítomnost elektrokardiostimulátoru
- » Přítomnost kovových implantátů v oblasti obličeje (aplikovaných přímo pod kůži)
- » Děti a mladiství (procedury jsou povoleny pouze pro osoby starší 18 let)
- » Alergie na anestetika, jako je lidokain
- » Těhotenství, protože existuje riziko, že se anestetické látky dostanou do organismu.
Po skončení období kojení je procedura znovu přípustná.
- » Onkologická onemocnění a chemoterapie
- » Epilepsie
- » Kožní onemocnění a/nebo (dočasné) zánětlivé procesy.

U těchto pacientů procedura není přípustná:

Pacienti trpící onkologickým onemocněním, podstupující chemoterapii a ozařování, pacienti s onemocněními ledvin, které ovlivňují srážlivost krve.

Pacienti, kteří užívají aspirin k prevenci srdečních a cévních onemocnění, musí předem konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a s jeho souhlasem vysadit přípravek.

Pacienti užívající lék Coumadin (s účinnou látkou warfarinem) k prevenci trombózy.

Pacienti užívající přípravky proti akné (například Tretinoin, Roaccutan aj.)

Přístroj je třeba používat přesně podle návodu.

Nesprávné použití může způsobit úraz.



Nevystavujte přístroj působení otevřeného ohně. Přístroj je nehořlavý, ale nesmí se vystavovat otevřenému ohni nebo extrémnímu přehřátí!

Před ošetřením vždy požádejte pacienta, aby vyplnil informovaný souhlas.
(viz Naše podpora – Doklady ke stahování).

Po ošetření vždy poučte pacienta o správné postprocedurální péči!

- » 1 přístroj Luxus PlasmaLiner Plasma
- » 1 pinzeta
- » 1 balení jehel 25 ks
- » 1 vysoce kvalitní pouzdro pro uchovávání přístroje
- » 1 prohlášení o shodě CE
- » 1 návod na použití
- » 1 záruční list
- » 1 napájecí zdroj



Přístroj Luxus PlasmaLiner je vybaven zabudovaným lithium-iontovým akumulátorem. Pro nezávislý na síti provoz přístroje je třeba nejdříve nabít akumulátor. **Před prvním použitím přístroje je třeba ho plně nabít během jedné noci!**



Pro nabíjení akumulátoru použijte dodávaný spolu s přístrojem napájecí zdroj s kabelem. Připojte kabel k přístroji (z opačného konce), pak zapojte napájecí zdroj do elektrické sítě.

Během nabíjení svítí **červená** (LED) kontrolka. Při úplném nabití kontrolka bude svítit **zeleně**. Doba provozu přístroje při plně nabitém akumulátoru činí 3-4 hodiny.

Přístroj lze používat i při zapojení do sítě. K tomu připojte k přístroji napájecí zdroj jak je popsáno výše. Začne proces nabíjení akumulátoru, a souběžně lze s přístrojem pracovat. Upozorňujeme, že napájecí kabel může překážet při práci.

NAPÁJECÍ ZDROJ S KABELEM



KONEKTOR NA ZADNÍ STRANĚ PŘÍSTROJE



SPOJENÍ MEZI KABLEM A PŘÍSTROJEM



PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKE SÍTĚ



Zapněte přístroj pomocí tlačítka (on/off), tak, že ho zmáčkněte a podržte po dobu přibližně 3 vteřin. Přístroj má dva výkonové stupně. Krátkým opakovaným zmáčknutím tlačítka (on/off) lze přepínat mezi těmito stupni.

Režim I má nižší výkon (odpovídá přibližně 65% výkonu II. stupně) a používá se především pro jemné ošetření menších vrásek. Naše rada: po absolvování školení a během prvních sezení vždy používejte I. stupeň, při tom stále zdokonalujte metodu a rychlost práce.

Režim II má vyšší výkon a hodí se především pro lifting obličeje a ošetření hlubokých vrásek.

Po zvolení potřebného režimu zmáčkněte jednou tlačítko (Plasma/LED) pro aktivaci provozního napětí, přitom se rozsvítí osvětlení pracovní zóny.

Při opakovaném zmáčknutí tlačítka (Plasma/LED) se provozní napětí a LED osvětlení zase vypnou.

Pokud je provozní napětí zapnuto, bliká kontrolka zvoleného provozního stupně (1/2) **červeně** barvy. Při podržení tlačítka (on/off) se přístroj úplně vypne.

UPOZORNĚNÍ! Pokud kontrolka režimu (1/2) bliká červeně a provozní osvětlení je zapnuto, je konec jehly přístroje Luxus PlasmaLiner **pod provozním napětím!**

TLAČÍTKO (ON/OFF)



PROVOZNÍ REŽIM 1/2



TLAČÍTKO



OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ OBLASTI (LED)




Jednorázové jehly se dodávají v sterilním obalu. Po každém použití musí být jehly vhozeny do speciálního odpadního kontejneru na jehly. Jehla se vkládá doprostřed utahovací objímky a otáčením se upevňuje na čelní straně přístroje.

Dávejte pozor, abyste nestrhli závit objímky!

STERILNÍ JEHLA



VKLÁDÁNÍ DO PŘÍSTROJE

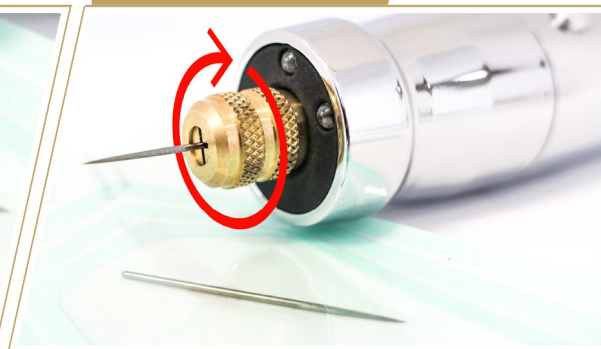

Zajistěte pravidelné čištění přístroje. Otřete přístroj nechlupatou látkou lehce navlhčenou isopropylalkoholem nebo podobnou tekutinou. Před čištěním vypněte přístroj a odpojte ho od elektrické sítě!

VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE



ODPOJENÍ OD ELEKTRICKÉ SÍTĚ



Pokud následující opatření nepomohly odstranit závadu, spojte se s Luxus BeautyLine.

PROBLÉM	PŘÍČINY	ZPŮSOB ODSTRANĚNÍ
Přístroj nejde zapnout.	Vybitý akumulátor.	Připojte napájecí zdroj a dobijte akumulátor.
	Akumulátor je nabit, ale problém přetrvává.	Obrat'te se na Luxus BeautyLine.
Přístroj se samočinně vypíná po 15 vteřinách provozu.	Dobijte akumulátor.	Připojte napájecí zdroj a dobijte akumulátor. Lze pokračovat v práci s připojeným napájecím zdrojem.

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Provozní napětí přístroje	Akumulátor 3,7 V / 5 V stálého proudu. (napájecí zdroj)
Jmenovitý příkon	max. 5 VA (napájecí zdroj)
Jmenovitý proud	max. 1 A
Stupeň krytí	III (bezpečné malé napětí)
Rozměry	200 x 28 mm
Hmotnost	cca 160 g
Výstupní výkon pracovní jehly	max. 0,5 W
Typ jehly // tvar: přímá	0,8 x 30 mm (svařenec, sterilní)
Osvětlení (za provozu)	2x LED (svítivost: 120 cd)
Napájecí zdroj // délka kabelu: 1,25 m	5 V  /3A, 15 W

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ, PROVOZU A PŘEPRAVY

Provozní podmínky	Teplota	+10° až +40°
	Relativní vlhkost vzduchu	20 - 75%
	Tlak	700 - 1060 hPa
Pokyny ke skladování	Teplota	+0° až +40°
	Relativní vlhkost vzduchu	20 - 90%
Podmínky přepravy	Teplota	-20° až +50°
	Relativní vlhkost vzduchu	20 - 90%

Přístroj: Zákon o elektrických a elektronických zařízeních (ElektroG) ze dne 24. října 2015 obsahuje transpozici Směrnice 2012/19/EU o odpadu s elektrickými a elektronickými zařízeními označované též Směrnice WEEE. V souladu s tímto zákonem jsme jakožto výrobce elektrických přístrojů povinni zajistit evidenci, označení a zpětný odběr vyřazených přístrojů. Společnost Luxus BeautyLine je zapsána jako výrobce v rejstříku Fondu vyřazených elektrických přístrojů EAR pod evidenčním číslem: WEEE-Reg.-Nr. DE 88250753.

Po skončení životnosti přístroje Luxus PlasmaLiner společnost Luxus BeautyLine ho zdarma převezme k likvidaci. Věříme, že tato strategie je ekologicky bezpečným řešením v zájmu našich zákazníků.

Jehly po jednom použití je třeba vložit do speciálního kontejneru a náležitě zlikvidovat.

Krabice a obalová fólie mohou být recyklovány.

SOUČÁSTKY A MATERIÁL

Těleso	Hliník
Vnitřní části přístroje	Plast
Desky plošných spojů	DURAVER-CU FR 4 NEMA
Pracovní jehla	Ocel

» Záruční doba přístroje činí 12 měsíců, akumulátoru - 6 měsíců.

ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA TYTO VADY:

- » Běžné opotřebení přístroje a příslušenství
- » Vady a poškození v důsledku nesprávného zacházení s přístrojem
- » Neoprávněný zásah do konstrukce přístroje, provedení neautorizovaných úprav přístroje
- » Použití jiného napájecího zdroje než ten, který je schválen výrobcem
- » V případě vzniku koroze a vad způsobených vniknutím do přístroje zbytků jídla a tekutiny
- » Škrábance a poškození plastových a kovových povrchů přístroje

UPOZORNĚNÍ! Při poškození nebo odstranění sériového čísla nebo záruční plomby z přístroje nebude nárok na záruční opravu uznán!

»

Pokud dojde k záručnímu případu bude přístroj opraven.

» Poruchy hlase na adrese distributora International Medical Expert s.r.o.



www.luxusplasmaliner.de
